

Any-Cem[®] (애니-셈)

자가접착형 레진 시멘트

지르코니아와 고강도 간접수복물의 합착을 위한 자가접착성의 이원중합형 레진 시멘트

특징

- Tack-cure 적용으로 잉여 시멘트를 간편하고 신속하게 제거
- 우수한 접착 강도
- 듀얼 큐어(Dual-cure)
- 별도의 전처리 과정 불필요




물리적 특성


	Any-Cem	Product B
Working Time	3'30"	2'00"
Setting Time	4'30"	6'00"

EASY CLEAN-UP
EASY HANDLING


Bond strength

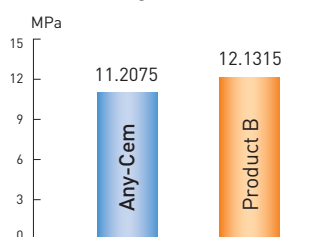

Bending strength

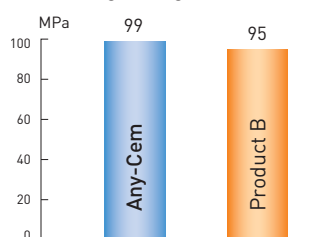

Film thickness

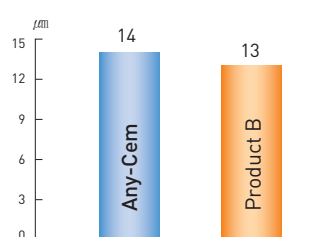

적용방법



- Any-Cem의 캡을 제거



- 시린지 전면에 팁을 연결



- 크라운 또는 브릿지 내부에 Any-Cem 적용



- 크라운 또는 브릿지를 치아에 적용한 후, 최종 경화 전에 잉여 시멘트를 제거



- 마진을 폴리싱하고 교합을 확인



자가접착성의 이원중합형 레진 시멘트

CONTENTS

203 Any-Cem 6g x 1ea

203-1 Any-Cem White 6g x 1ea

203-3 Any-Cem TL 6g x 1ea

소비자가격

77,000원

77,000원

77,000원