

접착과 안전성을 하나로

Any-Cem® 은 접착과 동시에 치아를 보호하는
2-in-1 기능의 차세대 자가접착 레진 시멘트입니다.

- ✓ **손쉬운 적용**
10-MDP 함유로 치아 전처리 및 별도 접착 과정 불필요
- ✓ **MBG(Mesoporous Bioactive Glass)에 의한 치질 재광화**
접착 내구성의 개선
- ✓ **효율적인 진료**
팁 장착 방식으로 별도의 혼합, 기구 및 장비 불필요
- ✓ **손쉬운 잉여세멘 제거**
이원 중합 시스템으로 간편한 잉여세멘 제거
- ✓ **편리한 상온 보관**
1~30℃ 상온 보관 가능



2-in-1

NEW

Any-Cem®

Dual-cured Self-adhesive Resin Cement



www.mediclus.co.kr



Catalog

Any-Cem®

✓ 2-in-1 Reinforced Adhesive Cement


Any-Cem®은 에칭 없이 적용 가능한 이원중합형 자가접착 레진 시멘트입니다.

10-MDP 기능성 모노머를 함유하여 치아 및 다양한 보철물과의 화학적 결합을 형성하며, 특히 지르코니아 및 금속과의 우수하고 안정적인 접착력을 제공합니다.


또한, 독자적인 MBG(Mesoporous Bioactive Glass) bioactive technology를 통해 hydroxyapatite 형성을 유도하고 상아세관을 효과적으로 봉쇄함으로써, 지각과민을 완화하고 접착의 내구성을 개선합니다.

Any-Cem®은 접착과 동시에 치아를 보호하는 2-in-1 기능의 차세대 자가접착 레진 시멘트입니다.

- ✓ **적응증**
- 지르코니아 : 크라운, 브릿지, 근관포스트
 - 울-세라믹 : 크라운, 3-유닛 브릿지
 - 간접복합레진 : 근관포스트
 - 메탈, 메탈-세라믹 : 인레이, 온레이, 크라운, 브릿지, 근관포스트
 - 티타늄 : 임플란트 어버트먼트 수복물

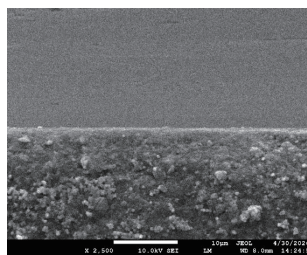

지르코니아와의 접착면(SEM, X 2,500)

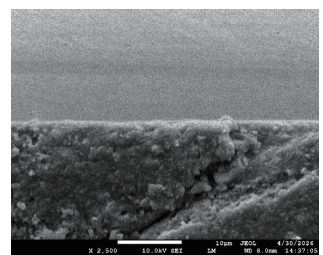

우치와의 접착면(SEM, X 2,500)

✓ 사용방법



임시 수복물을 제거하고 지대치를 깨끗하게 세척 및 건조합니다



수복물 내부에 Any-Cem을 주입합니다



수복물을 지대치 위에 장착합니다



잉여세멘을 1 - 2초간 광중합 합니다



잉여세멘을 제거합니다





광중합은 20초씩 해주며, 자가중합의 경우, Any-Cem이 4.5분 동안 경화 되도록 합니다




최종 확인

✓ Shear bond strength test

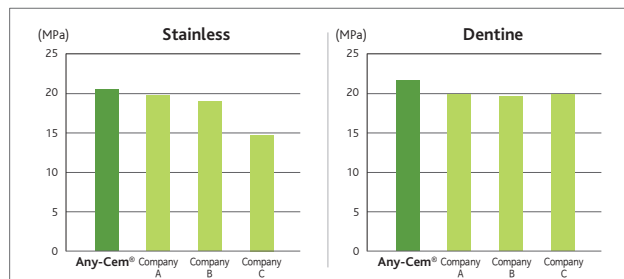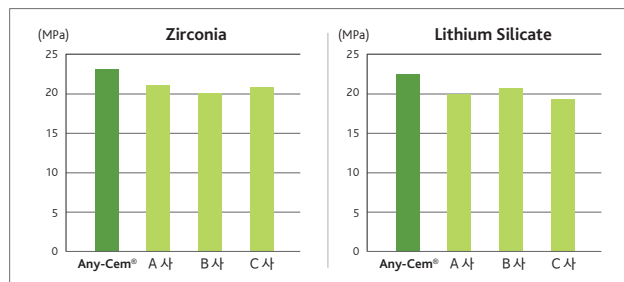

✓ Shade

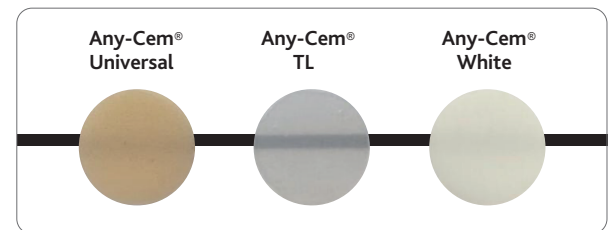

CONTENTS

- #203 Any-Cem® Universal 6g 1ea, Automix tips 10ea, Eco-Tip 1ea, Mixing pad 1ea
- #203-1 Any-Cem® White 6g 1ea, Automix tips 10ea, Eco-Tip 1ea, Mixing pad 1ea
- #203-3 Any-Cem® TL 6g 1ea, Automix tips 10ea, Eco-Tip 1ea, Mixing pad 1ea

|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877

서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com