


Any-Temp[®] NE

임시 합착을 위한 산화아연 기반의 유지놀 미함유 자가중합형 임시 시멘트

편안하고 강하게

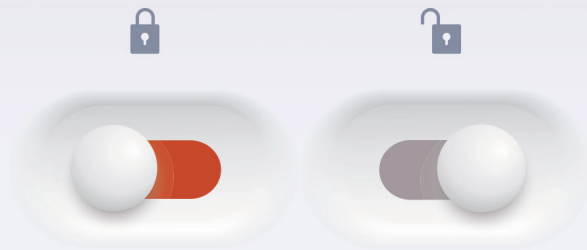

편안한 과정, 안정적인 유지

파우더와 리퀴드의 혼합 불필요: 오토믹스 시린지
높은 결합강도와 손쉬운 제거

부드러운 점도, 정밀한 적합

크림과 같은 점도로 편안한 적용과 용이한 조정
얇은 필름 두께와 우수한 봉쇄

Any-Temp® NE

임플란트 크라운과 다양한 보철물의 안정적인 고정과 편안한 제거가 가능한 임시 시멘트

Any-Temp® NE는 임플란트 크라운과 브릿지, 인레이, 온레이의 안정적인 임시합착을 위해 개발되었습니다. 유지놀을 미함유한 이 제품은 아크릴 성분의 임시 보철물과 레진 시멘트의 중합에 영향을 주지 않고, 보철물 제거 시 대부분의 잔류물이 보철물 내면에 남아 치면의 정리와 세척이 간편합니다. 얇은 필름 막은 보철물의 정밀한 적합을 가능하게 하고 마진과 갭을 긴밀하게 봉쇄합니다.


적응증

- 임플란트 유지 크라운, 브릿지, 인레이, 온레이의 임시합착
- 올-세라믹과 복합레진 수복물의 임시합착

이점

- 안정적인 고정과 간편한 제거
- 적절한 강도
- 효율적인 작업시간: 90초 (25°C)
- 높은 방사선불투과성: 400% AI
- 얇은 필름 두께: 20 μ m
- 심미적인 쉐이드: Ivory
- 오토믹스 더블 푸시 시린지를 사용한 손쉬운 적용

적용과정 (임플란트 크라운)

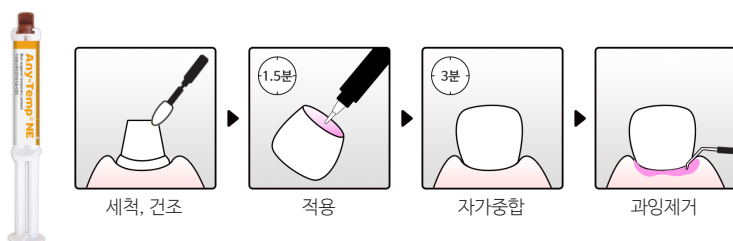

제품구성



#201-1 Any-Temp® NE

Any-Temp NE 10g x 2ea
ECO-tip 2ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

