


# 치은압배와 출혈조절을 한번에

✓ **줄어드는 시간, 향상된 2 in 1 효과**

- 알루미늄염의 수렴 효과로 빠르고 안정적인 출혈 조절
- 균일한 페이스트 도포로 우수한 점막 밀착과 확산

✓ **의료진과 환자의 편안함**

- 불편감 감소, 깨끗하고 빠른 세척
- 치료 전략을 지원하는 두 가지 점도와 색상

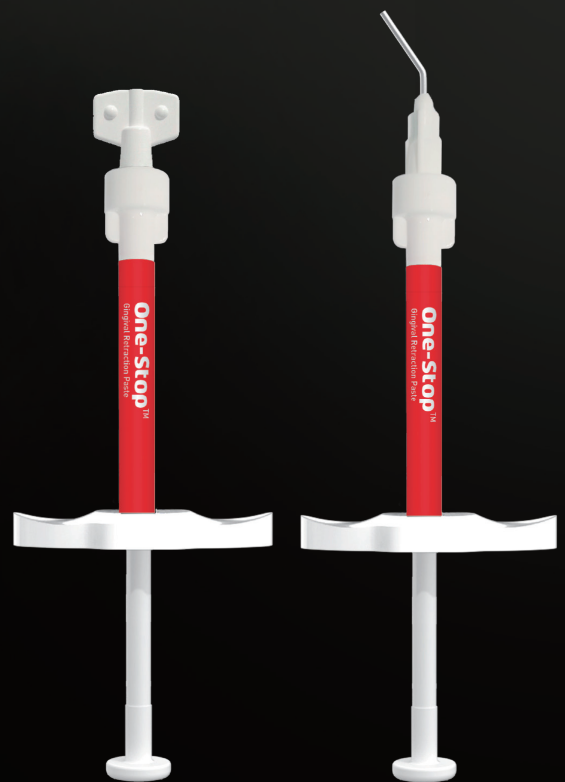

인상 시  
스트레스를  
줄여준다!

**NEW**

## One-Stop™

Gingival Retraction Paste



www.mediclus.co.kr



Video



Catalog

# One-Stop™

## 치은압배와 출혈조절을 동시에! 빠르고 간편하게! 두 가지 효과를 제공하는 페이스트형 인상 전 처치제

### ✓ 2 in 1 메커니즘으로 더욱 정밀한 임상결과를 실현합니다.

One-Stop™은 인상 채득 전에 치은압배(gingival retraction)와 출혈 조절(bleeding control)을 동시에 제공하는 페이스트형 국소 처치제입니다. 알루미늄염의 수렴 작용(astringent effect)으로 빠르고 안정적인 연조직 관리(tissue management)가 가능하며, 균일한 페이스트 도포를 통해 세밀한 부위까지 정밀하게 적용할 수 있습니다.

사용 후에는 물 세척만으로 간편하게 제거되어, 진료의 효율성과 환자의 편안함을 동시에 제공합니다.

- ✓ 적응증
- 정확한 마진 확보가 필요한 인상 채득 전
  - 크라운·브릿지 준비 시 치은 출혈 및 수분 관리
  - 접착 및 시멘트 전, 청결한 작업 환경 확보
  - Class II·V 수복 시, 치은 인접부의 습기 및 출혈 제어
  - 짧은 체어타임과 환자 편안함이 요구되는 임상 상황

✓ 색 상



- **Medium Flow (Yellow)**
- 얇거나 중간 깊이의 치은열구에 적용
- 디지털 및 아날로그 인상 채득 전 치은열구 확장 및 건조
- 일시적 출혈 조절 용도에 적합



- **Low Flow (Blue)**
- 깊은 치은열구나 두꺼운 치은 조직에 적용
- 더블 코드(Double cord) 기법에서 2차 코드의 대체용으로 권장

✓ 적용과정



Clinical Case by Dr. Borikhan Yerborat (KOL)



Before Treatment



Apply One-Stop (2min) & Dry



After Treatment



#### CONTENTS

- #1101-1 One-Stop™ Blue 0.85g x 7ea
- #1101-3 One-Stop™ Blue 0.4g x 30ea (Unit Dose Capsules) | Blue
- #1102-1 One-Stop™ Yellow 0.85g x 7ea | Yellow

### |주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877  
서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875  
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

**MDCLUS**  
MEDICLUS CO., LTD.