

아직도, 냄새나는 재료를 사용하시나요?

Ezi-Crown® (이지-크라운)

광중합형 임시 크라운 **FDA**

소비자가격 44,000원



싱글크라운



1 싱글 크라운 케이스



2 언더컷 부위에 Dentto-Dam을 적용한다.



3 수용성 분리제인 The-Sep을 적용한다.



4-1 Ezi-Crown을 치아에 적용한다.



4-2 적당량의 Ezi-Crown을 prep한 치아에 적용한다.



5 교합 및 치아 모양을 만들어준다.



6 20초간 광중합한다.



7 만들어진 치아를 다듬어준다.



8 임시 시멘트를 적용 후, 제작된 임시 치아를 세팅한다.

Case by Dr. HoYeol Jang
HoYeol Jang Dental Clinic

브릿지 케이스



1 제거할 크라운 및 브릿지



2 제거할 보철물의 언더컷 부분에 Dentto-Dam을 이용하여 블럭아웃한다.



3 보철물 형성 그대로를 복원하기 위해 투명한 인상재 (Any-Flex Clear)를 사용하여 인상채득한다.



4 보철물을 제거하고 치아를 Prep 한다.



5 인상채득한 트레이에 Ezi-Crown을 채우고 구강 내에서 교합을 맞추고 광중합한다. (광중합 20초씩 2회)



6 구강 내에서 광중합된 임시치아를 제거한 후, 트레이에서 Ezi-Crown을 제거한다.



7 Trimming 한다.



8 완성된 임시 보철물



9 임시시멘트를 적용 후, 임시보철물을 구강내에 세팅한다.

Case by Dr. HoYeol Jang
HoYeol Jang Dental Clinic

TEMPORARY CROWN COMPLETED IN LESS THAN 5 MIN.



냄새가 없어요!
[자극적인 냄새가 없음]



빠르다!
[2~5분 내 제작가능]



저렴하다!
[크라운 개당 원가 500원]

적용

1. 임시 크라운 및 브릿지
2. 임시 보철물의 리라이닝
3. 보철물 복제 시
4. 발치 즉시 임플란트 시 임시치아

리라이닝 케이스



1 임시 보철물이 잘 맞지 않는 케이스



2 수용성 분리제인 The-Sep을 적용한다.



3 Ezi-Crown을 적용하여 그림과 같이 보철물에 적용한다.



4 구강 내에 고정 후, 리라이닝 한다.



5 Curing 한 후, 레진을 카빙한다.



6 10초간 광중합한다.



7 구강내에서 제거한 후, 다시 그림과 같이 레진을 적용한 후, 리라이닝 한다.



8 결과

Ezi-Crown

Contents :

#703-1 Ezi-Crown A1 15g x 2ea

#703-2 Ezi-Crown A2 15g x 2ea

#703-3 Ezi-Crown A3 15g x 2ea

Immediate 단계 (발치 즉시 임플란트 케이스)



1 II번 치아 발치 케이스



2 발치 전 인상을 채득한다.



3 발치



4 임플란트를 식립한다.



5 봉합한다.



6 식립된 임플란트 주변을 보호하기 위해 Dentto-Dam을 그림과 같이 적용한다.



7 인상채득해둔 트레이에 Ezi-Crown을 적용하고 20초간 광중합한다.



8 임시 시멘트를 적용 후, 제작된 임시치아를 구강내에 세팅한다.

Case by Dr. HoYeol Jang
HoYeol Jang Dental Clinic