

Desens[®] Bio-Care

치아의 강화와 우식방지, 민감증 완화를 위한 특별한 치아관리 크림

더 편안하고, 더 강하게



더 편안한 적용, 더 나은 보호

안전한 불소농도 900ppm: 성인과 어린이 모두에게 적합
상황에 맞는 개별적인 적용: 진료실과 가정 모두에서 사용

더 강한 치아, 더 큰 웰빙

특허된 MBG와 불소: 빠른 재광화 작용으로 치아의 강화와 보호
신뢰할 수 있는 제조사가 제공하는 검증된 치아관리 크림

Desens[®] Bio-Care

진료실과 가정에서, 성인과 어린이 모두가 매일 사용할 수 있는 특별한 치아관리 크림:
치아강화, 우식방지, 민감증 완화


Desens[®] Bio-Care는 전문적인 적용과 일상에서의 사용이 모두 가능한 치아관리용 데일리-케어 크림입니다. 이 제품에 함유된 특허된 MBG (Mesoporous Bioactive Glass)와 불소성분은 구강 내 타액과 만나 칼슘과 인을 방출하고 뼈와 치아의 주요 구성성분인 하이드록시 아파타이트를 빠르게 형성합니다. 그 결과, 치아가 강화되고, 우식의 위험이 낮아지며, 민감증이 감소됩니다. Desens[®] Bio-Care는 다양한 연령의 환자들에게 삶의 웰빙을 제공합니다.

적응증


- 노출된 치경부나 예민한 치아의 민감증 완화
- 스케일링이나 치아미백 후 시린 증상의 완화
- 백색병소나 초기우식으로 약화된 치아구조의 강화
- 위생관리가 어려워 우식 위험이 높은 치아의 보호: 교정환자, 어린이, 군인

이점


- 전문적인 진료의 장기적인 성공 지원
- 문제부위의 특별한 관리를 위한 전문적인 조언
- 매일 사용을 통한 효과적이고 장기적인 치아보호
- 부드럽고 달콤한 복숭아 맛과 향으로 즐거운 사용

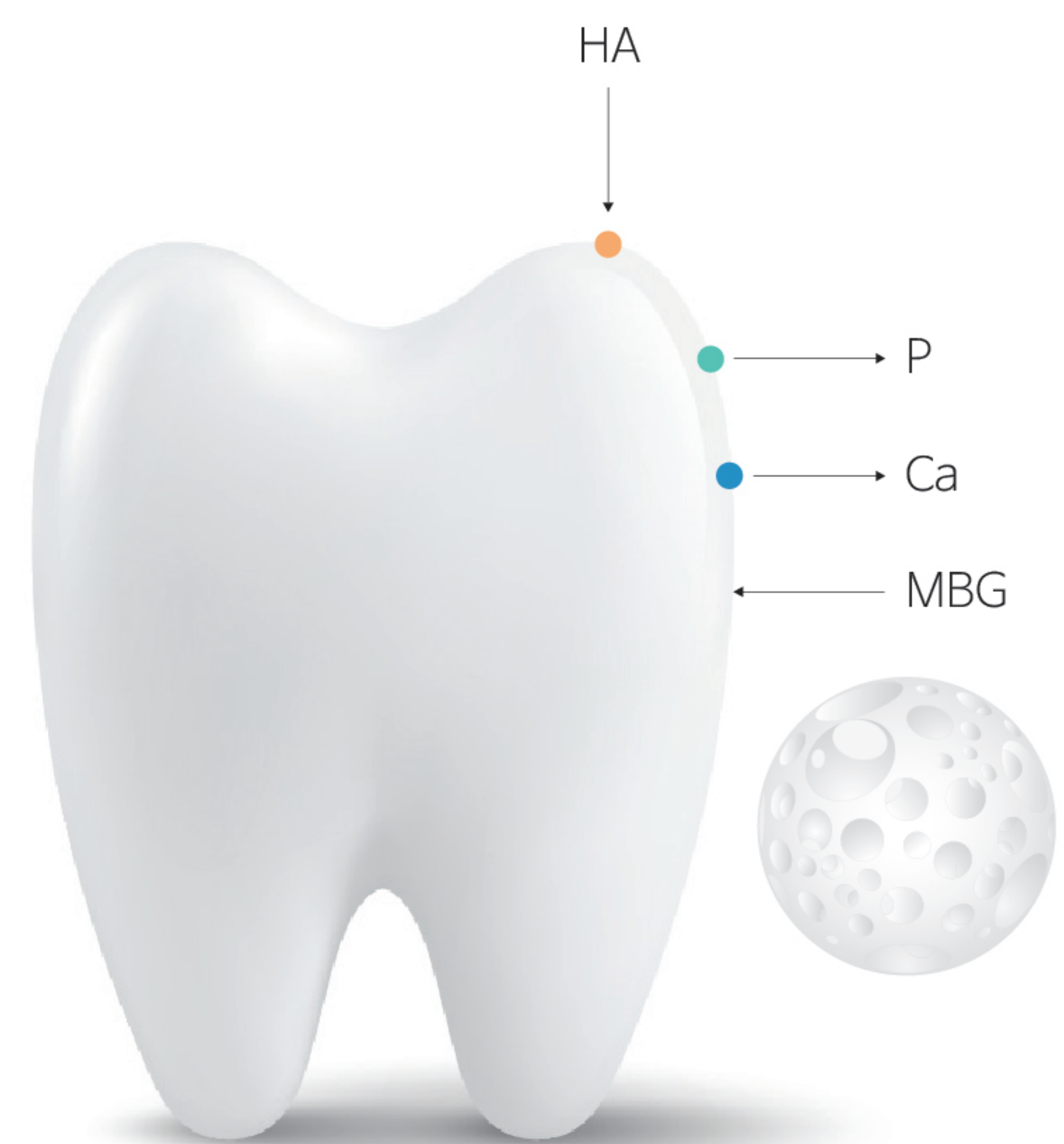


상아질액 유동성 분석 (상아질, 실시간)

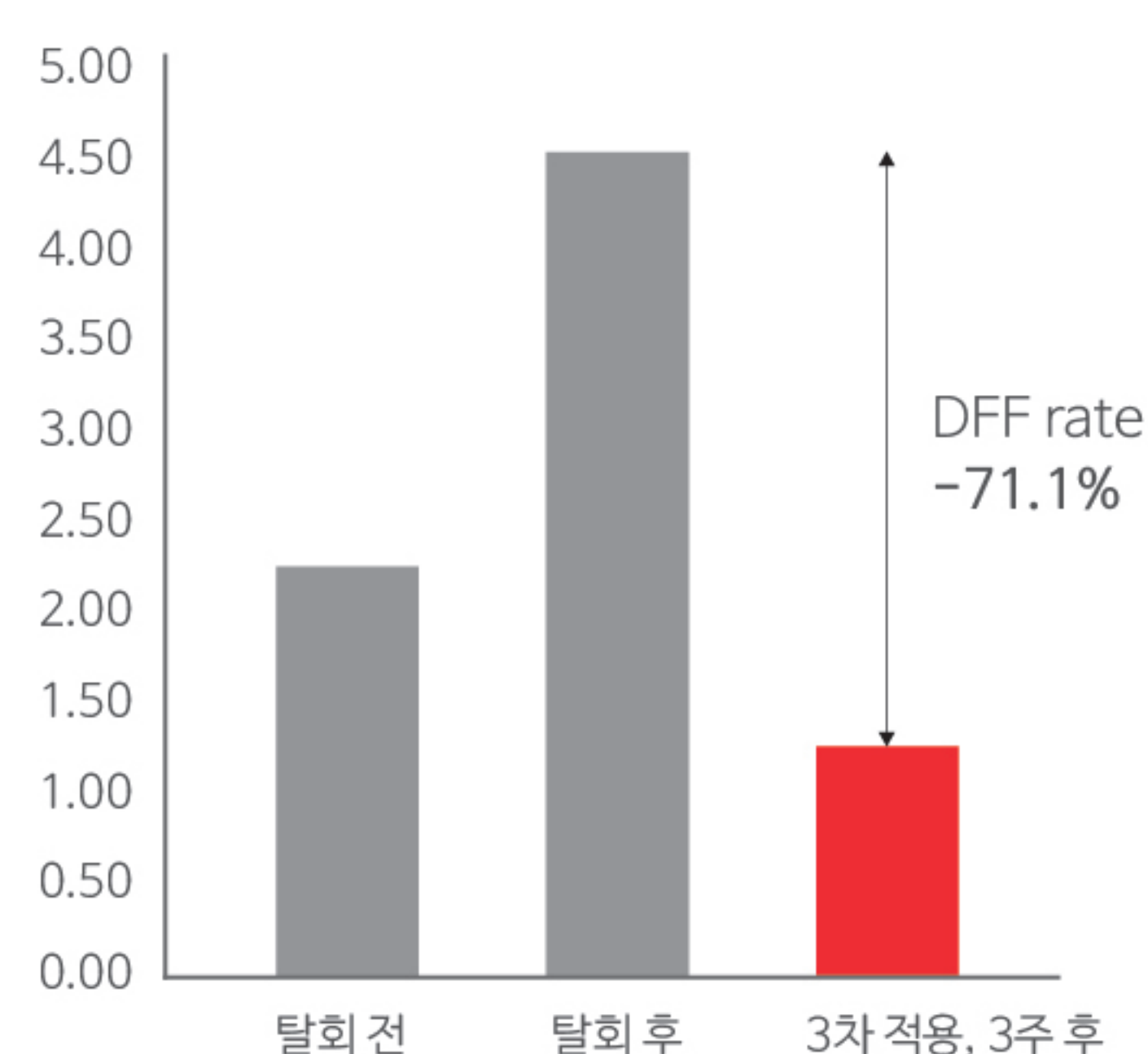

Desens[®] Bio-Care

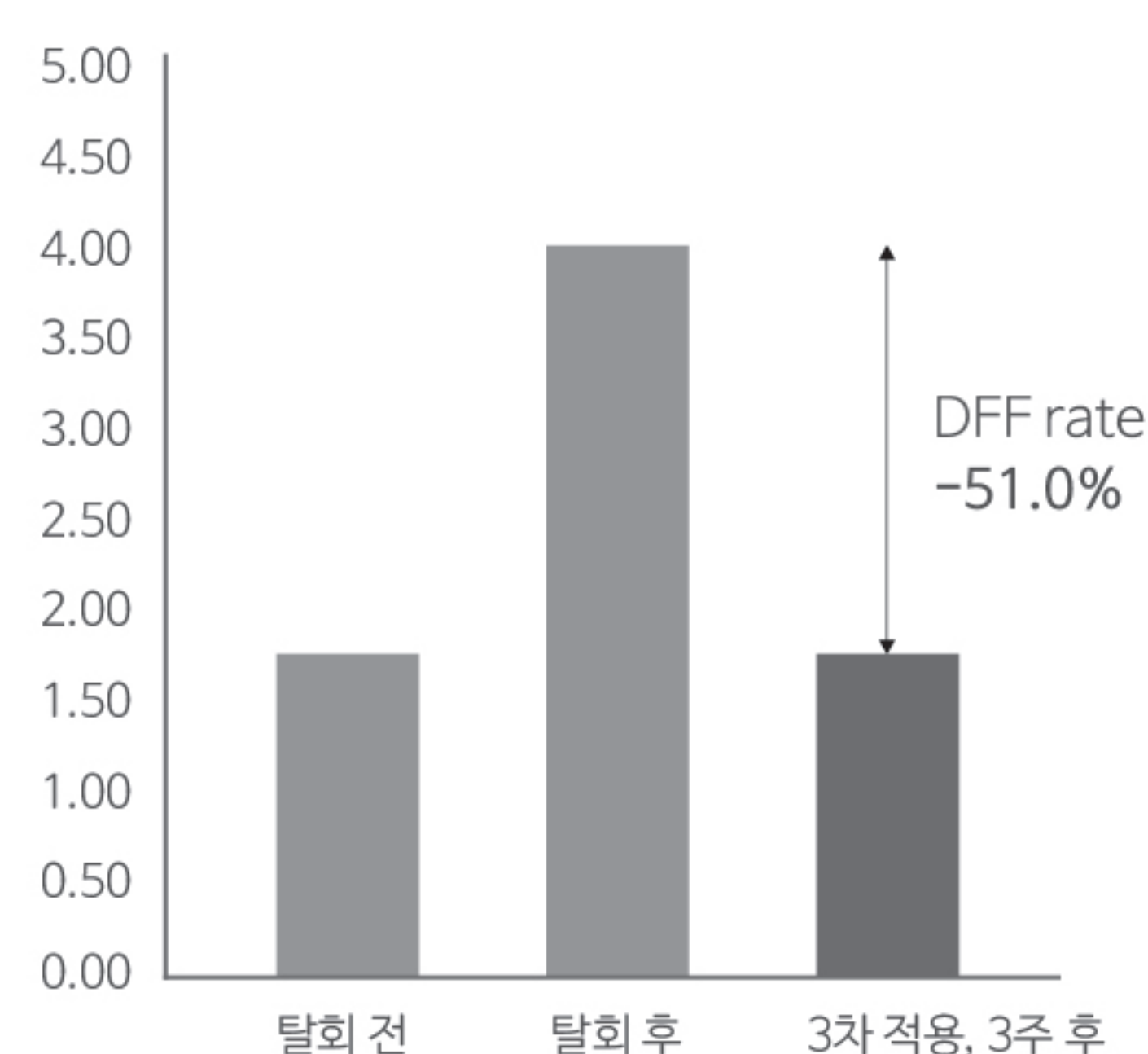

제품 C


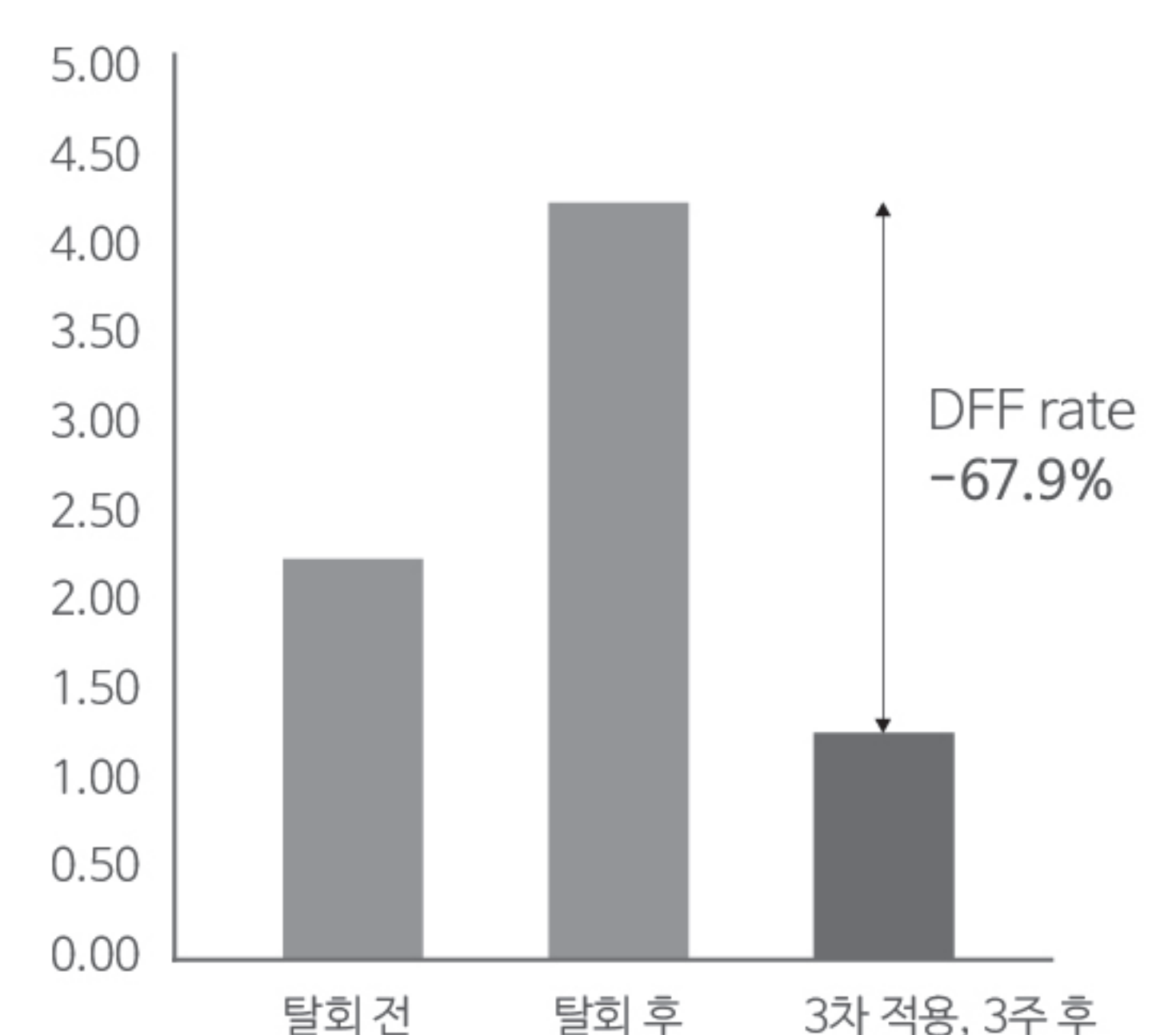


제품 T





* 출처: 경희대학교 치과대학 보존과

치아 재광화 효과 1 (상아질, 5분/일)

● 도포

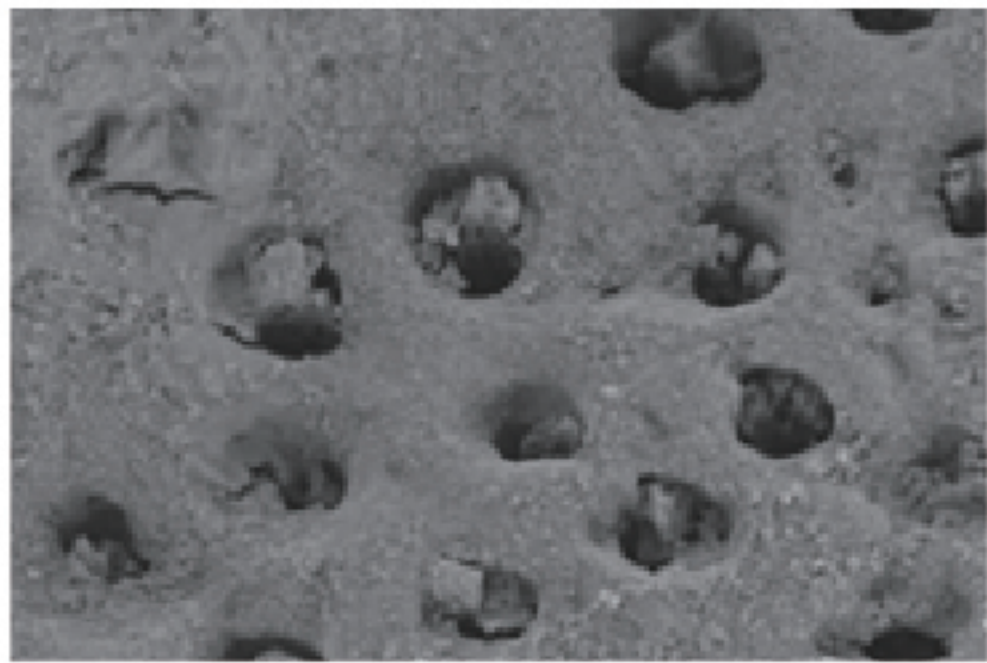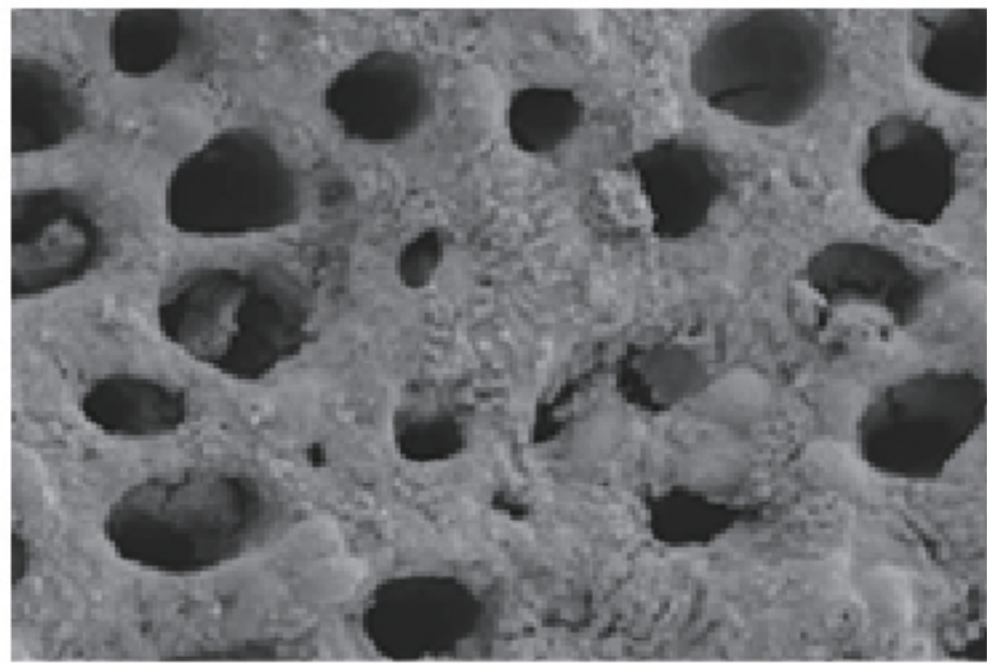

● 칫솔질

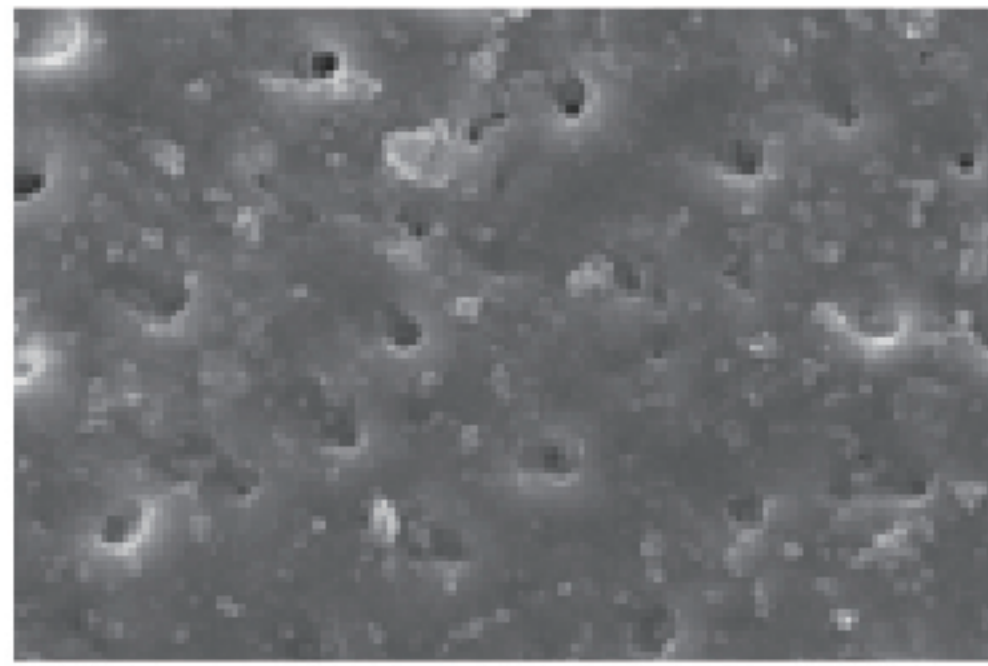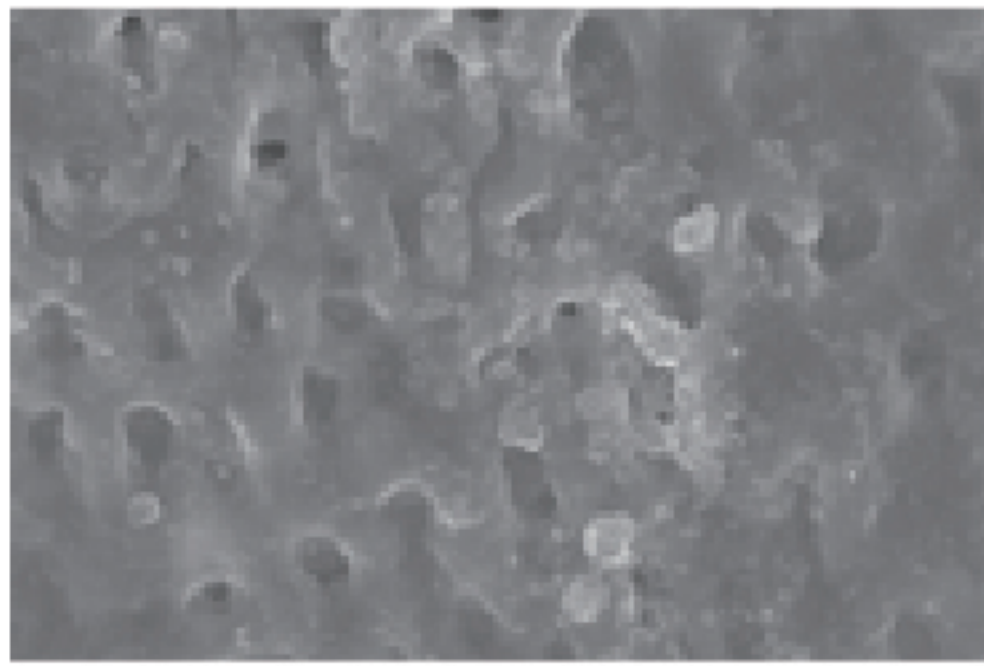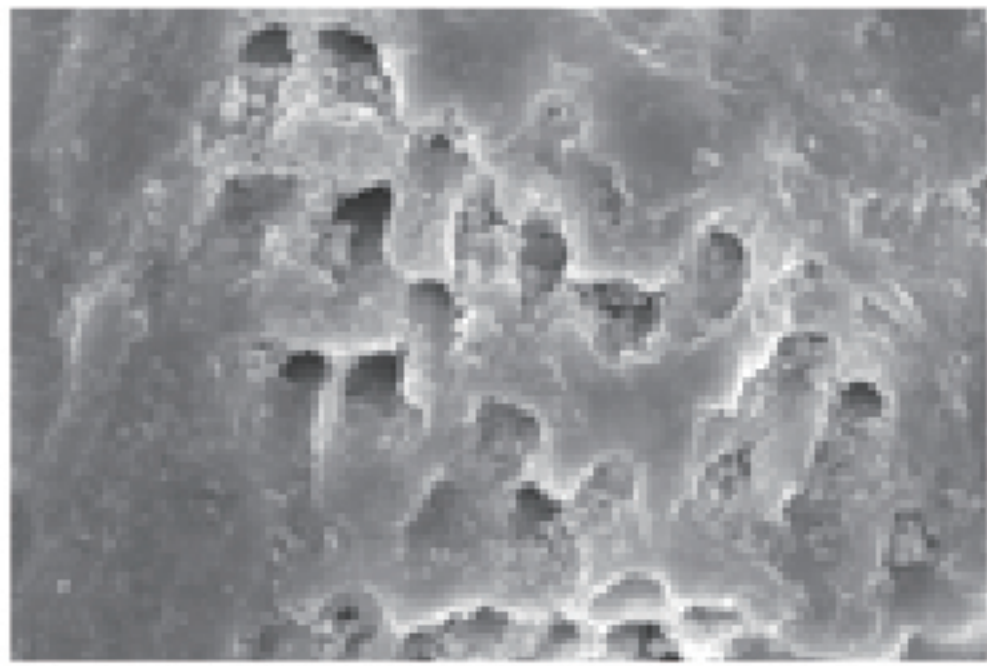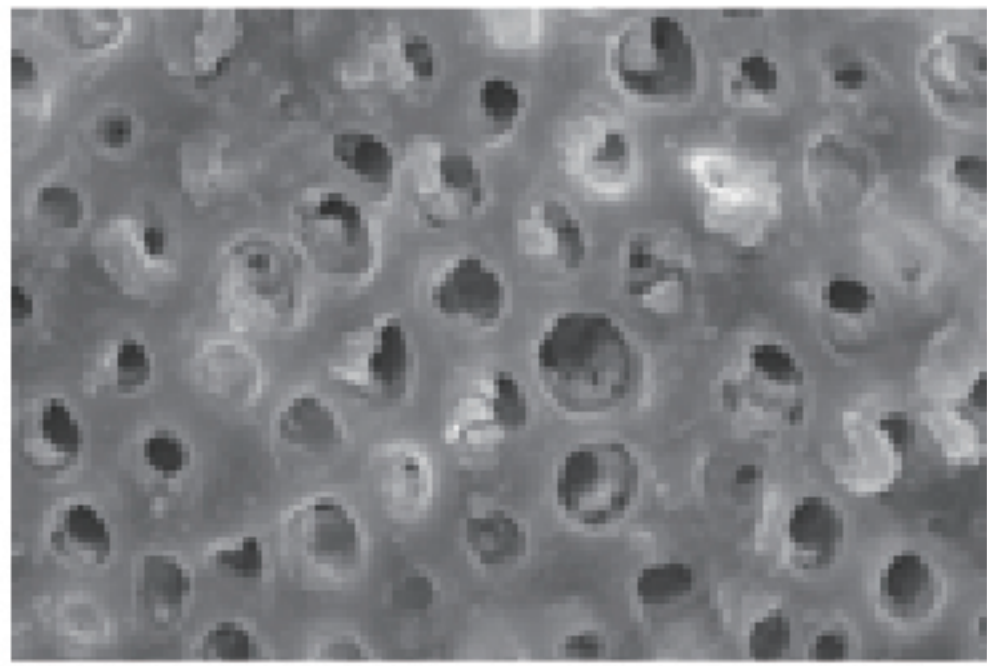

적용 1주 후

적용 2주 후





적용 3주 후

적용 4주 후





* 출처: 메디클러스 R&D

치아 재광화 효과 2 (상아질, 24시간)





● Desens® Bio-Care

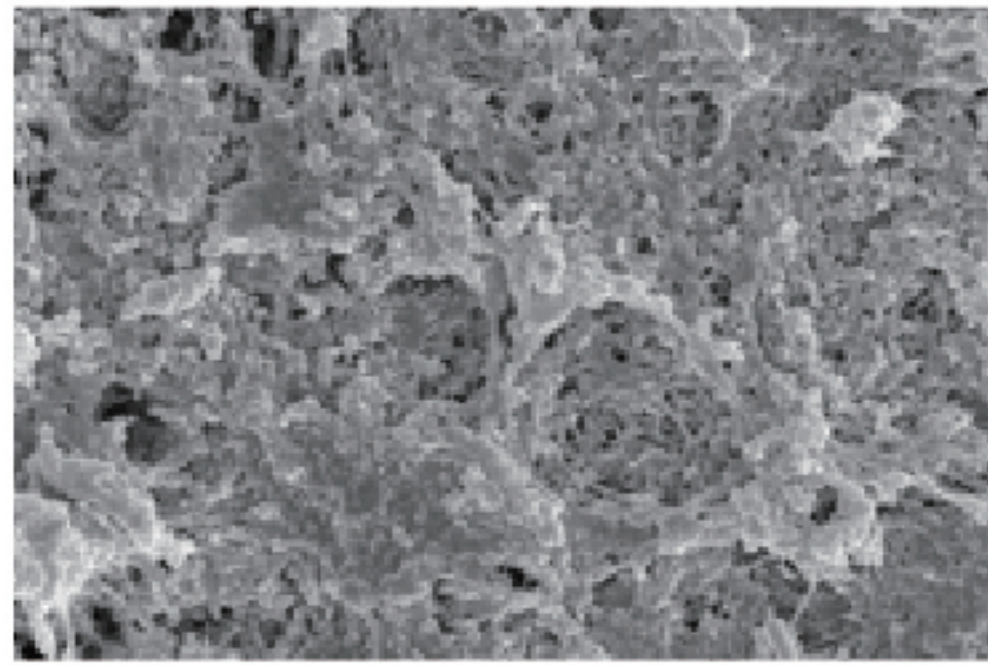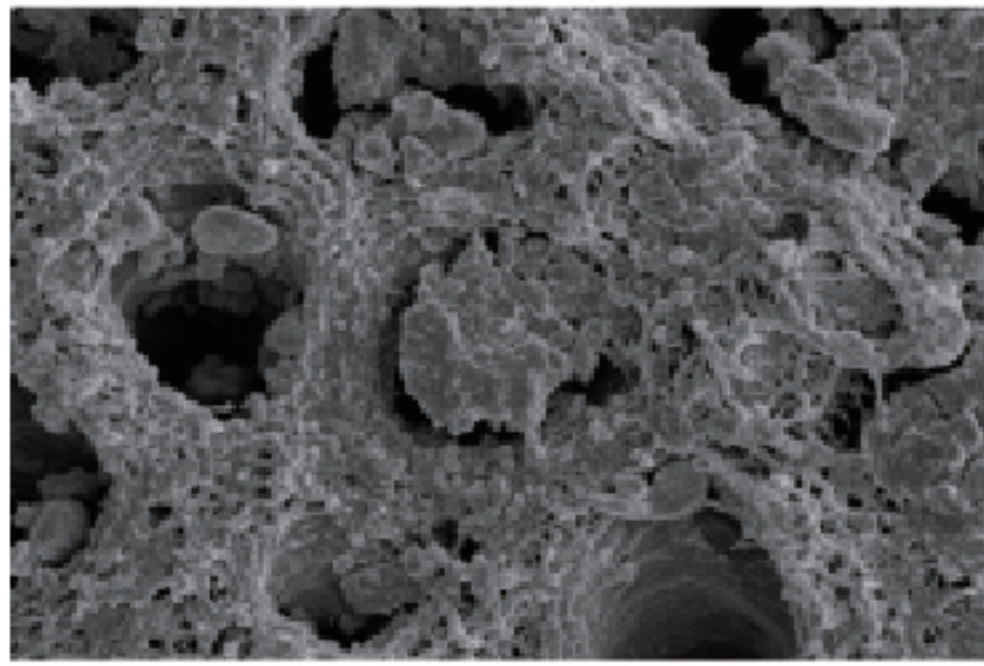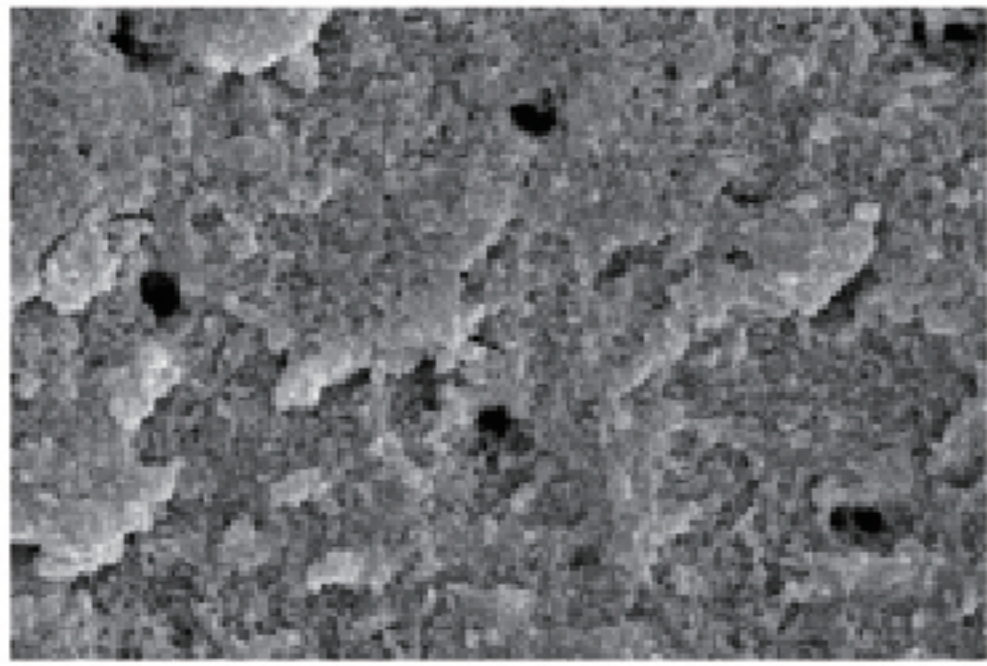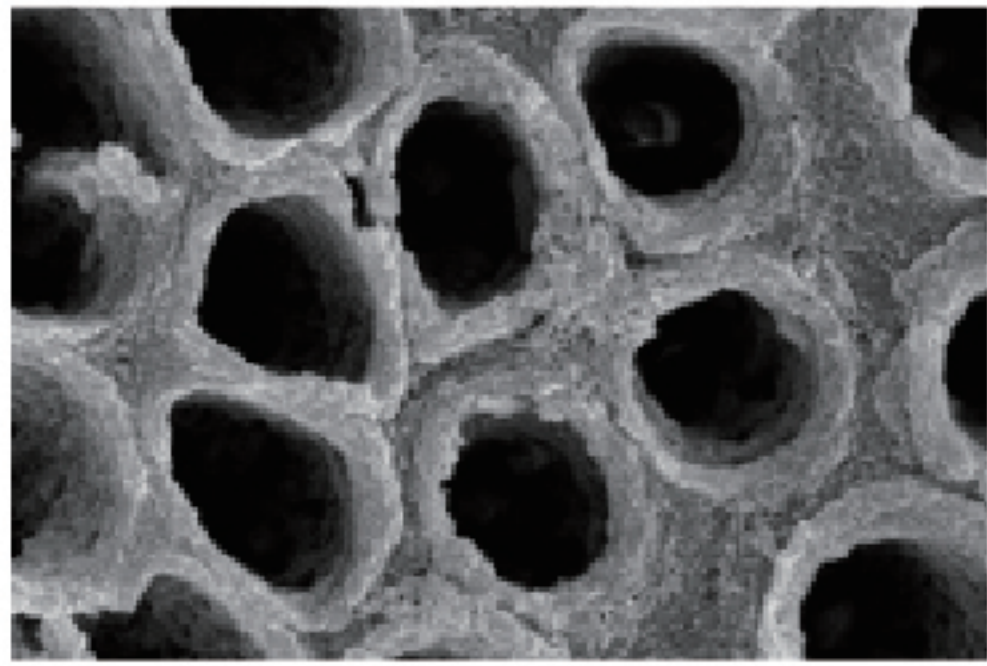

● 제품 C

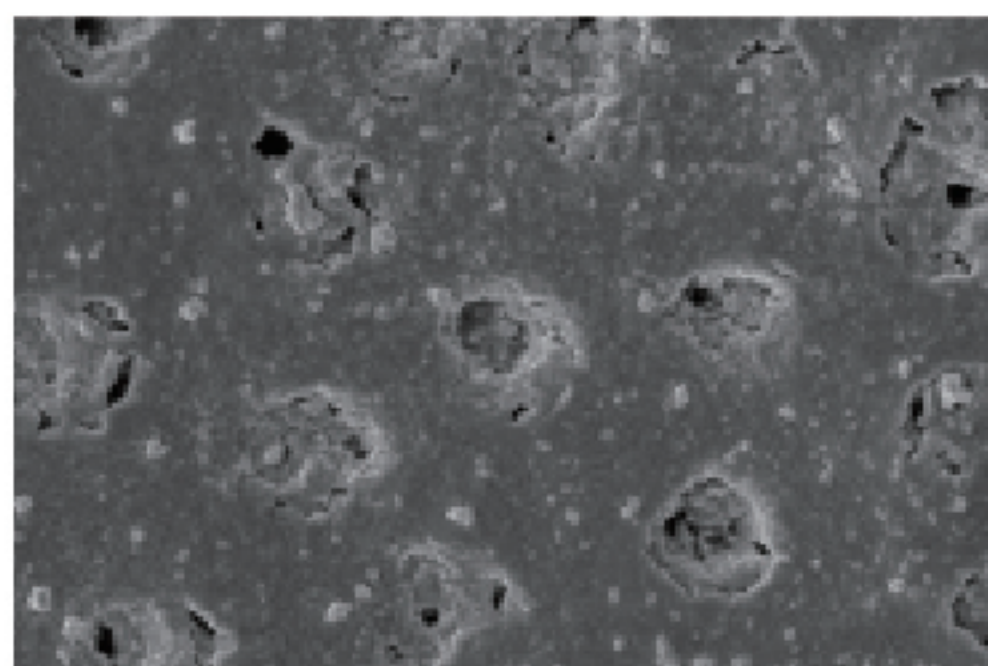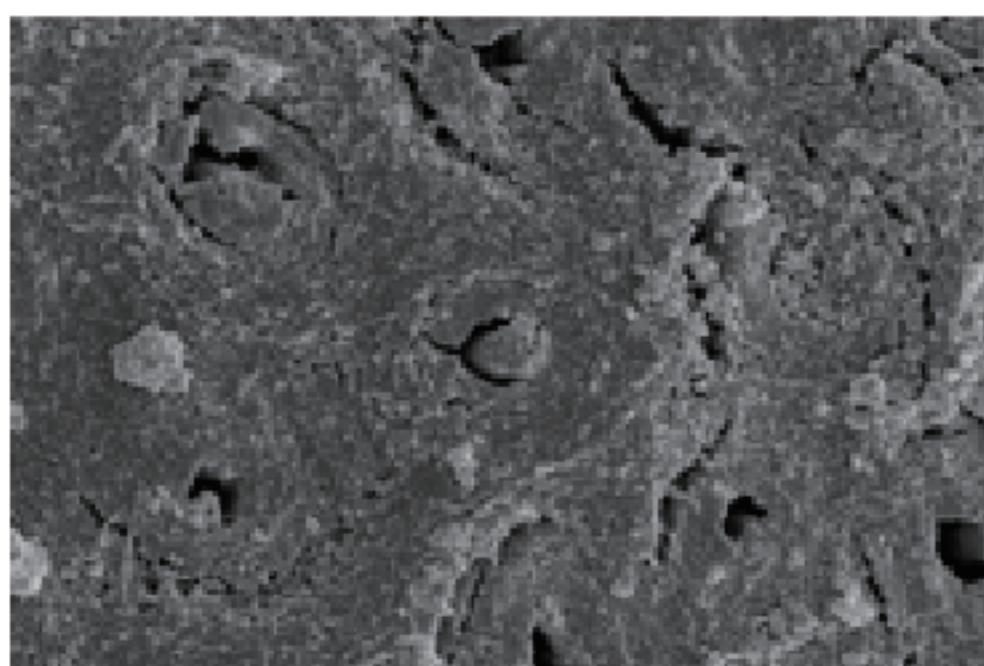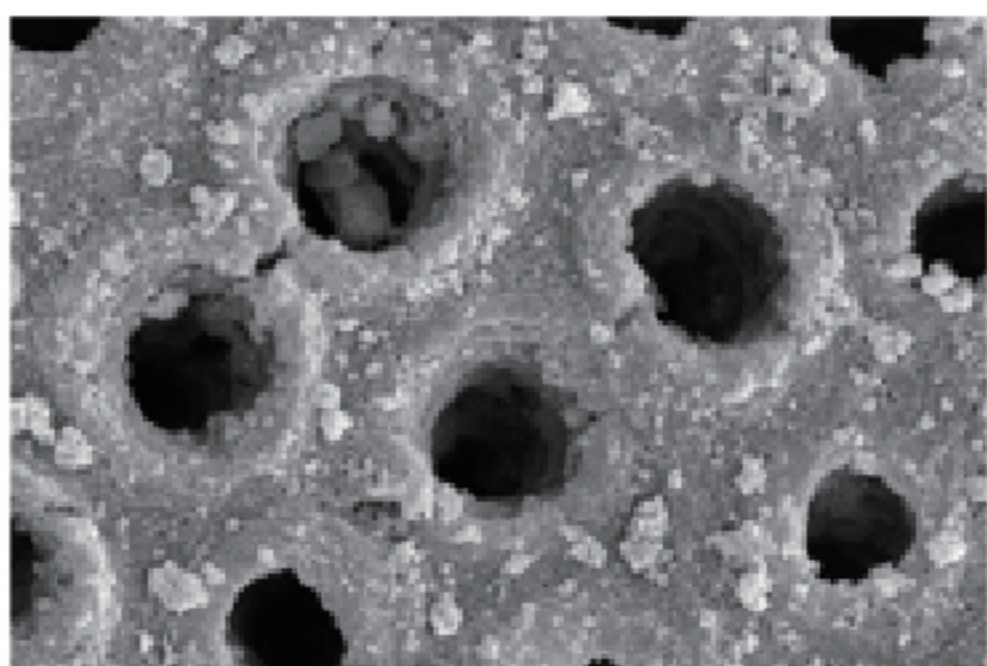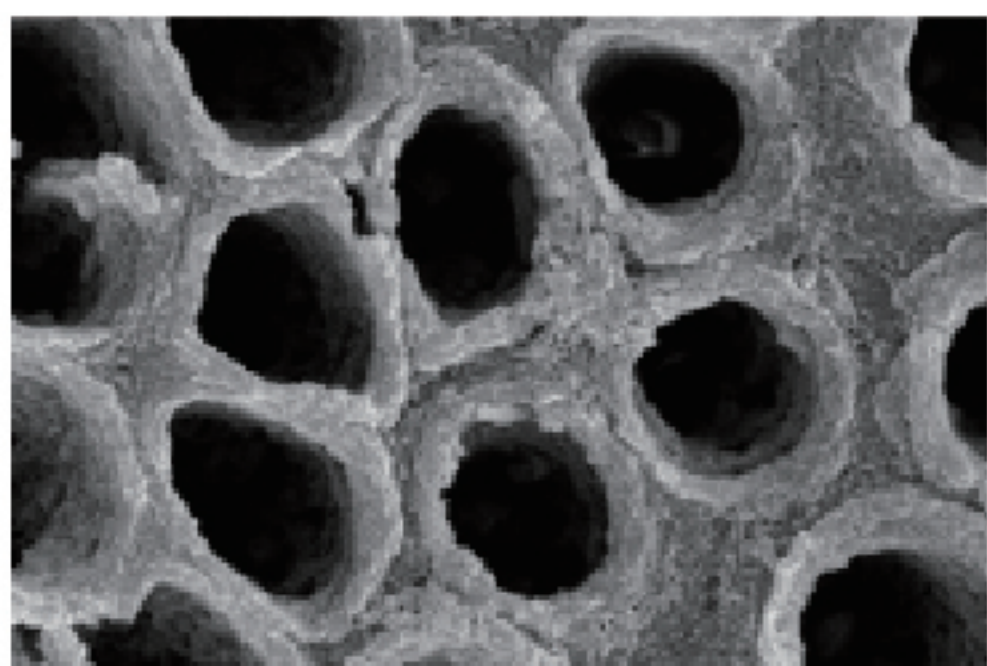

● 제품 T

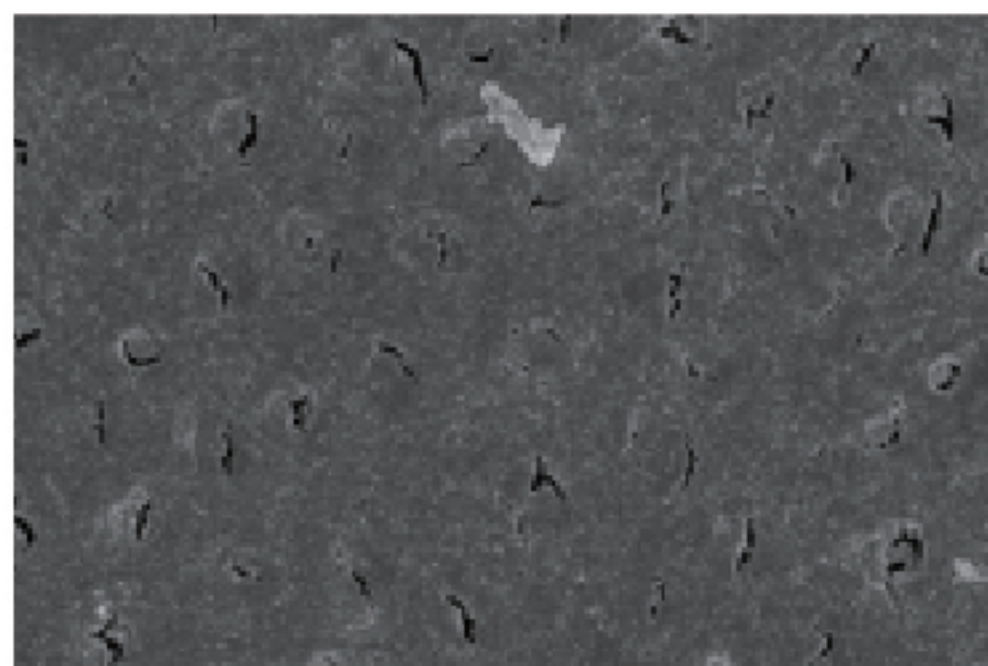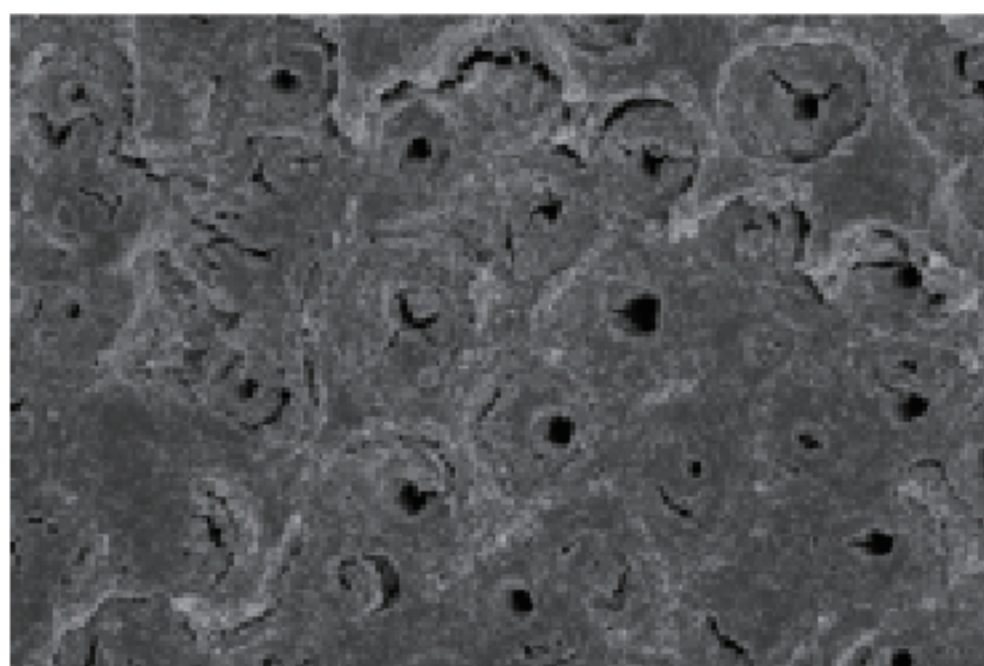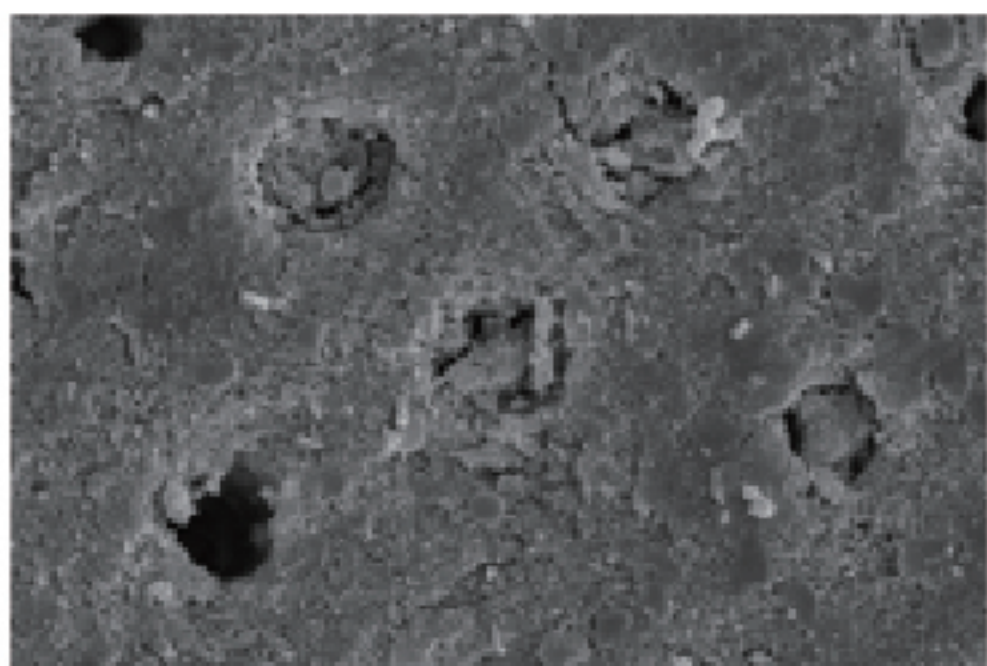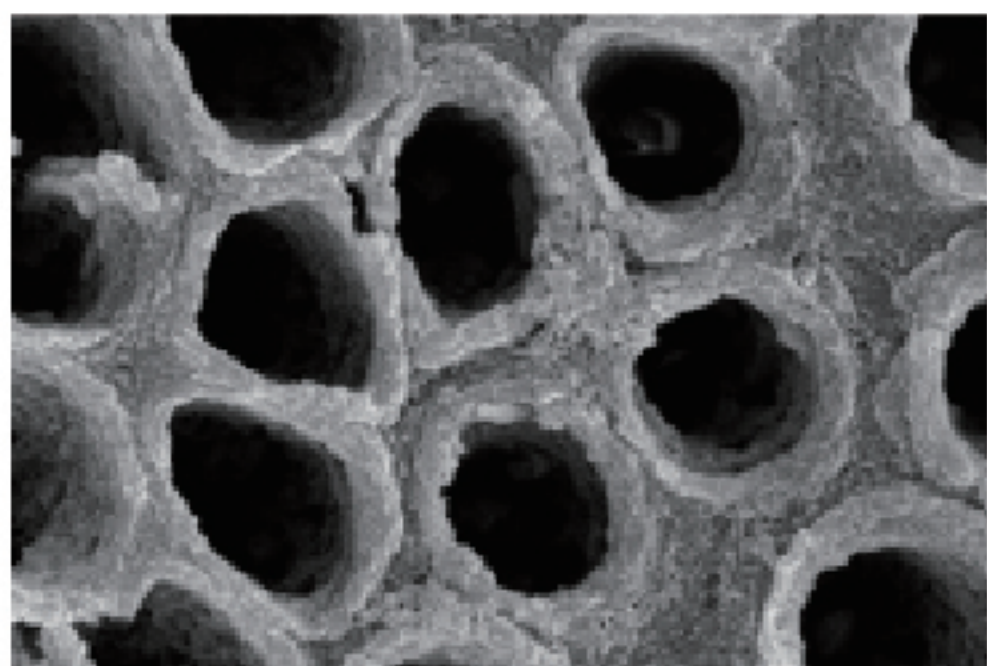

탈회된 상아질



1차 적용, 1주 후

2차 적용, 2주 후

3차 적용, 3주 후

* 출처: 경희대학교 치과대학 보존과

미네랄 (HA) 증감수치 분석 (상아질, 24시간)

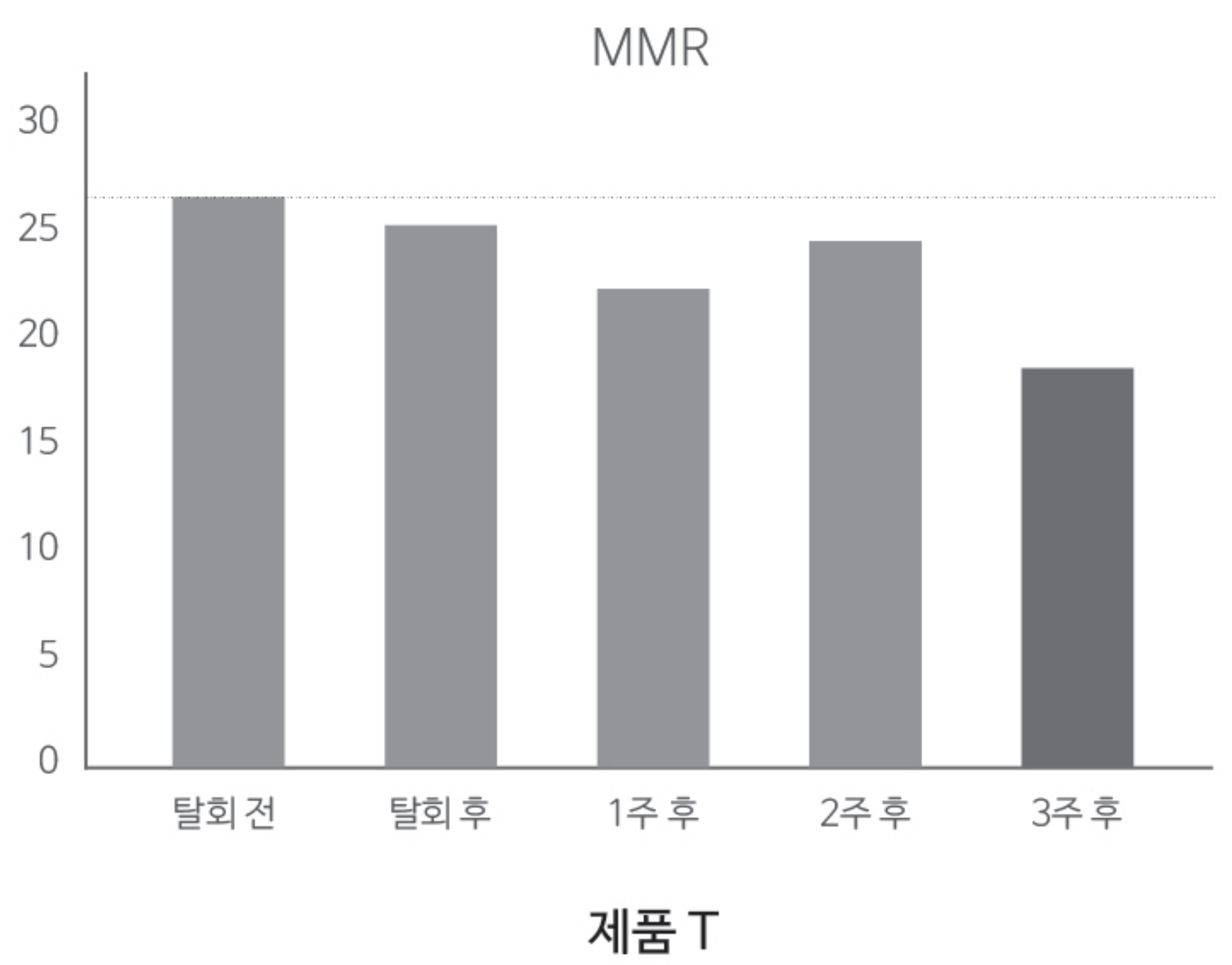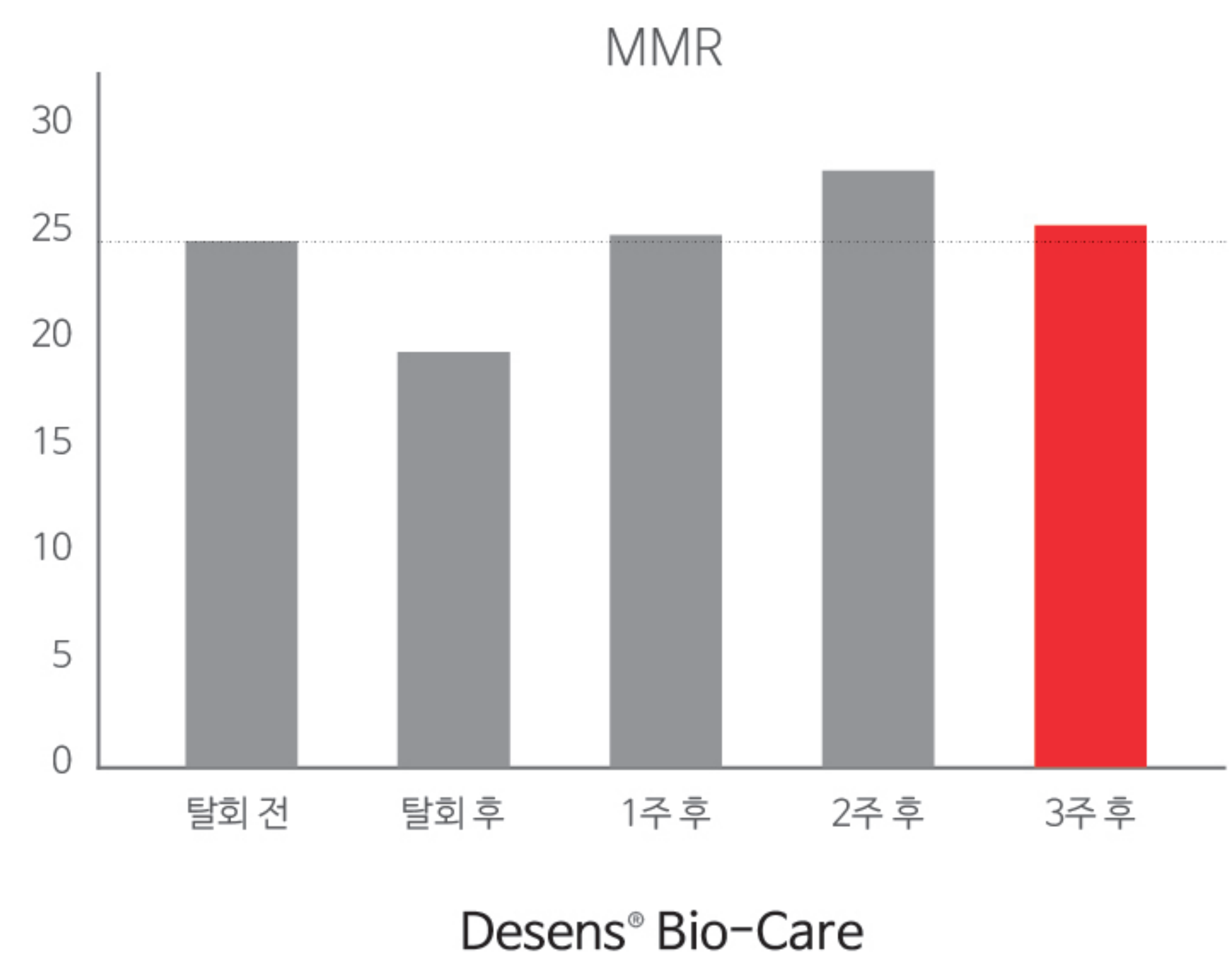

* 출처: 경희대학교 치과대학 보존과

사용 방법

세 가지 방법 중 하나를 선택하실 수 있습니다.



방법 1

- 취침 전, Desens® Bio-Care를 치약과 섞어 3분간 양치한 후 충분히 헹구고 2주간 지속적으로 사용하십시오



방법 2


- 취침 전, 칫솔을 사용하여 Desens® Bio-Care를 치아에 바르고 3분간 유지한 후 충분히 헹구고 2주간 지속적으로 사용하십시오



방법 3

- 취침 전, 브러시 또는 트레이를 사용하여 Desens® Bio-Care를 치아에 바르고 3분간 유지한 후 충분히 헹구고 2주간 지속적으로 사용하십시오

적용 과정

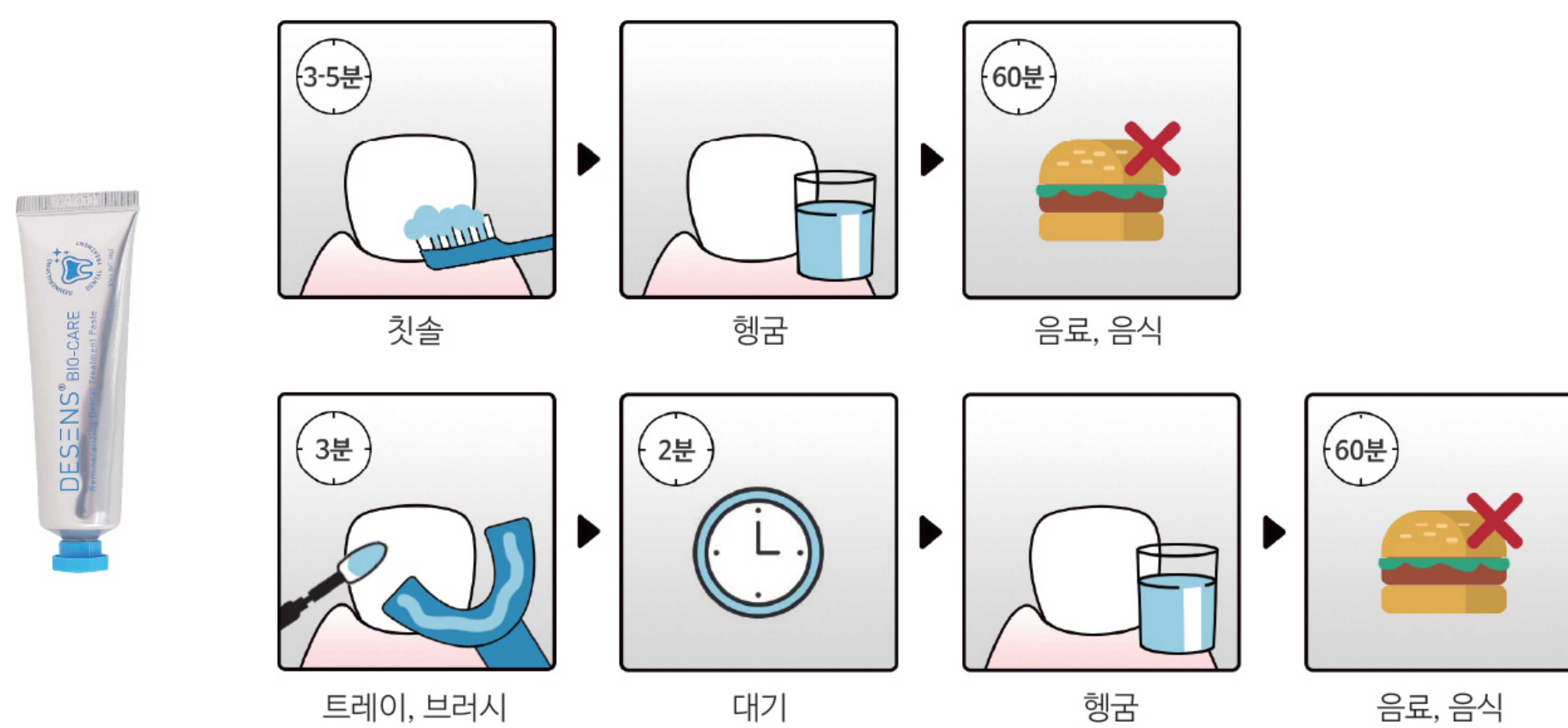

제품구성



Desens® Bio-Care

#401-4 Desens® Bio-Care 30mlx 1ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.medclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

