

빈틈없이 보호하고 한 번에 제거

✓ **정밀한 적용** (Precise Application)

최적화된 점도로 불필요한 흐름 없이 치은 변연을 따라 정확한 도포가 가능합니다.

✓ **신뢰할 수 있는 보호** (Reliable Protection)

균일하고 견고한 차단막을 형성하여 화학적 자극으로부터 연조직을 효과적으로 보호합니다.

✓ **잔여물 없는 제거** (Residue-Free Removal)

한 번에 깔끔하게 제거되며, 잔여물이 남지 않습니다.

✓ **블루 컬러로 우수한 시인성** (Bluish Color for Enhanced Visibility)

뛰어난 색상 대비로 도포 부위를 명확히 확인할 수 있으며, 제거 시 잔여물 확인이 용이하여 임상 효율성을 높입니다.



Dentto-Dam™

Light-cured liquid dam for precise isolation



Dentto-Dam™

✓ 정확하게 보호하고, 한번에 제거되는 Liquid dam

Dentto-Dam™은 잇몸 보호와 러버댐 실링, 그리고 손쉬운 제거로 정확하고 편리한 진료를 제공하는 제품입니다. 치아 미백 시 잇몸보호, 러버댐 장착 시 보조적 실링, 신경치료 시 국소부위 격리 및 보호, 수복 및 접착 시 선택적 격리 등 임상가가 정밀하고 효율적인 치료를 수행할 수 있도록 도와주는 광중합형 리퀴드 댐입니다.

✓ 적응증

- 미백 시 미백제와 잇몸 사이 차단
- 에칭제, 블라스팅 분말 등 자극 물질로부터 잇몸 보호
- 러버댐 장착 시 보조적 밀폐 효과 제공
- 신경치료 시 치아 Wall 형성

✓ 임상사진




Whitening (Wash, dry)




Apply & Light curing (20s)



Remove (in one piece)

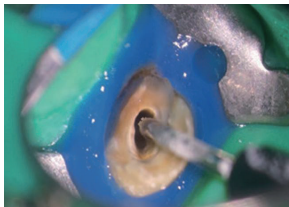

Isolation Rubber Dam I

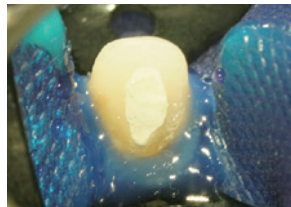

Isolation Rubber Dam II



Endo-wall

✓ 적용과정 (미백 시)



① 치아 세척 및 건조



② 적용



③ 광중합



④ Dam 제거

CONTENTS
#402 Dentto-Dam™ 1.2 ml x 5 ea,
Disposable tips



|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877
서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

MDclus
MEDICLUS CO., LTD.