

designed for dentists

WHITENING SOLUTION

MEDICLUS Dental Solution


치아 미백 솔루션

본사/기술연구소

28576 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단로 134 세종테크노밸리 1210호
전화 : 043-211-2877 / 팩스 : 043-211-2866
E-mail : saleskr@mdclus.com

서울사무소

04510 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤 735호
전화 : 010-6416-2875 / 팩스 : 02-6499-1006

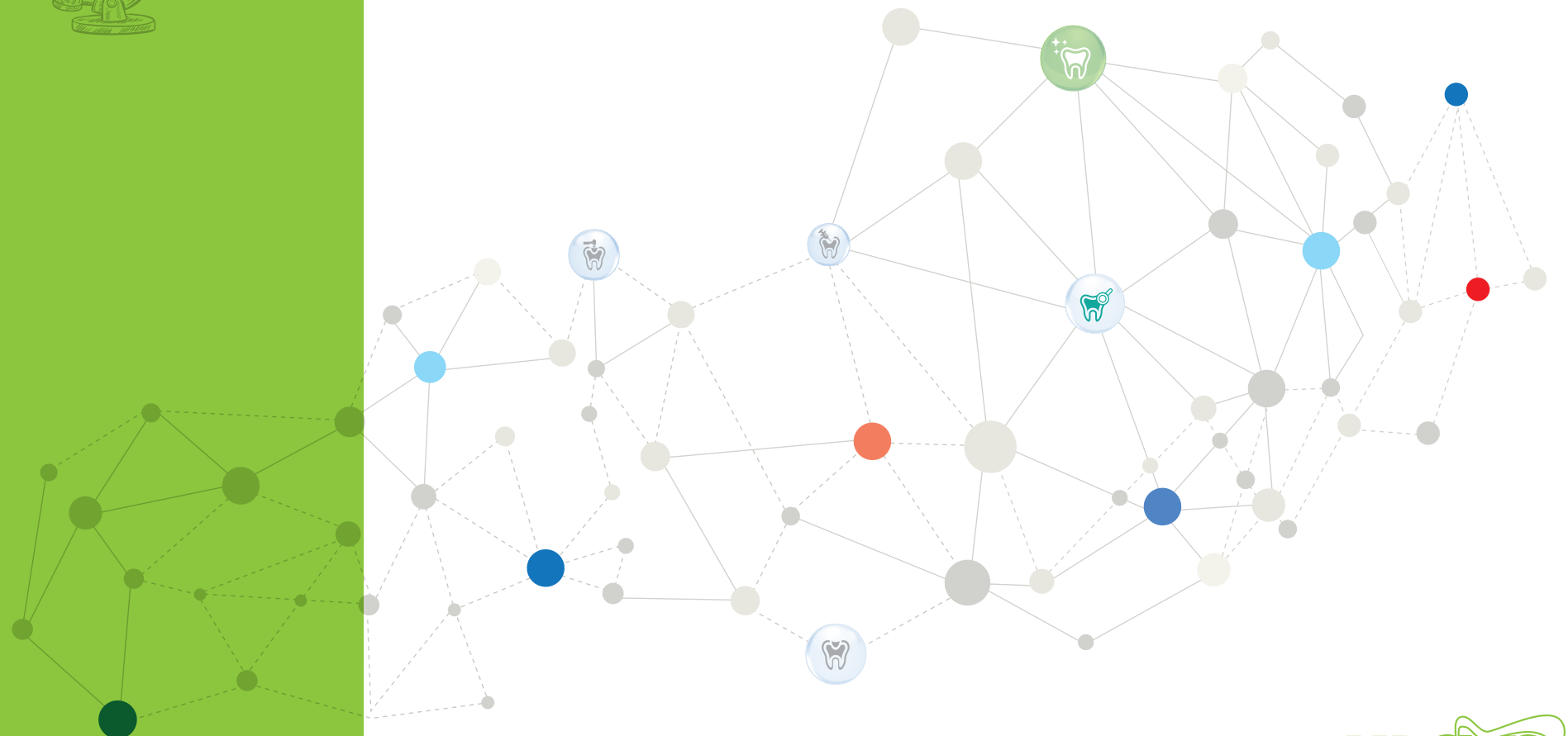

MEDICLUS provides the best solution to dentists for efficient and reliable results

WHITENING SOLUTION

쉽고, 간단한
치아 미백 솔루션

MULTI-FUNCTIONAL GEL

1



W-GEL KIT

치과용 연마제

Contents :
#401-1 W-Gel 5ml x 2syr.
Mixing brush x 10EA
Mixing bowl x 10EA
소비자가격 : 165,000원



W-GEL PREMIUM

치과용 연마제

Contents :
#401-2 W-Gel Premium 1g x 10EA
Mixing brush
소비자가격 : 99,000원

- * W-GEL은 고점도 젤 타입 치과용 연마제로써, 다양한 임상에 적용이 가능합니다.
- * 점착성이 우수하여, 체어각도 변화에 재료가 흘러내지 않습니다.
- * 시린지 형태로 용량조절이 용이합니다.
- * 산뜻한 오렌지 향으로 타재료와 사용시 불편한 냄새를 차단해 줍니다.

리퀴드 러버댐

2



DENTTO-DAM

광중합형 러버댐,
미백 시술 시 잇몸 보호제

Contents :
#402 Dentto-Dam 1.2ml x 5syr.
Disposable tips
소비자가격 : 45,000원

- 러버댐 장착 시 완벽한 실링
- 선명한 블루 색상으로 식별이 용이
- 광중합 시 열발생이 없어 환자에게 안전
- 최적의 흐름성으로 적용이 용이
- 러버댐의 완벽한 실링 및 장착
- 신경치료 시, 치아 Wall 형성 가능



덴탈 바세린

3



EZI-SEP

비타민 크림

- 고농축 비타민 E 함유로 연조직 재생에 탁월한 효과
- 수용성 바세린

Contents :
#1001 Ezi-Sep 20g x 1EA
소비자가격 : 27,000원

SHADE BLUE / WHITE

After 6 minutes (탁월한 수세성)



미백 QUICK GUIDE

- 환자의 치아 상태 및 색상을 확인한다.
- W-Gel과 Activator를 균질한 GEL 상태가 될 때 까지 혼합한다.
* 시린지에 담겨 있는 Gel은 눈금 하나당 Activator 1병을 적용한다.
- 법랑질 막 제거를 위해 '퍼미스'를 한다.
치아 상태에 따라 적당한 Particle Size의 퍼미스를 선택한다.
- 법랑질 막 제거가 끝나면 개구기를 설치 후, 치아 및 잇몸을 건조한다.
- 잇몸 보호용 댐을 설치한다.
잇몸과 댐의 구분이 쉽도록 Blue 색상의 Dentto-Dam 사용을 권장한다.
* 댐 적용 시 국소부위가 아닌 잇몸에 충분히 넓게 도포하는 것이 중요하다.
* 댐이 적용되어 있는 부분을 돌아가며 여러 번 광중합한다.
환자의 입술 및 잇몸에 건조 방지용 바세린 (Ezi-Sep)을 바른다.
- 위의 모든 준비 과정이 끝나면 2단계에 혼합해 놓은 Gel을 해당 치아에 2~3mm 두께로 도포한다.
이때, 칠하듯 바르지 말고 Gel을 올려 놓은 후 치아에 밀착되어 안전하게 자리 잡도록 한다.
* 필요 시 광선 조사기를 이용하여 시술의 효과를 높이도록 한다.

TIP

- * Activator는 2중 포장으로 되어 있지만, 증발을 막기 위해 냉장보관을 권장한다.
- * 일반적인 오피스 브리칭은 10분 3회를 권장하며, 10분 내에 광선조사기의 빛과 열로 인하여 과산화수소가 50% 이상 증발하게 되어 효과가 저하되므로 새로운 약제로 3회의 과정을 반복하도록 한다.
- * W-GEL은 혼합 시 Activator가 넘치지 않도록 고안된 안전한 용기이다.
타사의 경우 혼합 시 작은 용기로 인해, Activator가 용기 밖으로 넘치는 실수를 빈번하게 하게 된다.
- * 치아 미백의 원리는 과산화수소로부터 발생된 산소를 이용하여 오염된 치아를 표백하는 과정이다.
LED 광선 조사기 사용 시, 12~15분 3회를 권고 하며, 환자 상태에 따라 시술 조건을 변경한다.

치아 미백기


4

ALADDIN

유 • 무선형 치아 미백 광선조사기
(LED TOOTH WHITENING SYSTEM)

소비자가격 : 990,000원

전문가의 진단과 검증된 장비를 통해
정확한 시간과 양을 조절하여
보다 하얗고 아름다운 치아를
만들어 드립니다.

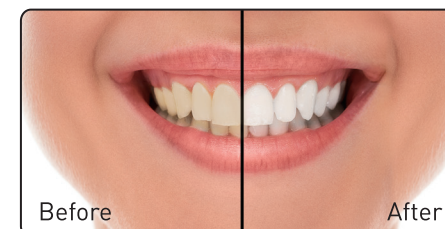

KFDA

식약처(KFDA) 승인받은 제품입니다.
제조국 : 대한민국 / 제조원 : (주)디엑스엠